

## 調整式杖取扱上のご注意

この度は本製品をお買上げありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、読み終わった後も大切に保管してください。

### ご使用前に

この杖は、杖無で自立歩行できる方が、より安定して歩行できる補助的に使用するものです。次のような場合は使用に適しません。

※体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることがあります。

又、使用後に次のような状態になった場合はご使用を停止してください。

※杖無で歩行できない方

手すりに伝わらなければ歩行が困難な方や、介護者が必要な場合。

※リハビリ中などで、身体の一部を支えないと歩行が困難な方。(医師などの指導のもとでの使用は含みません)

本体	カーボン
持ち手	天然木(楓)
サイズ	71～93.5cm
重量	284g

発売元：(有)プロビジョン  
〒224-0032  
横浜市都筑区茅ヶ崎中央 41-8  
ステーションアリーナ 201  
TEL.045-948-0331 FAX.045-948-0332



原産国：台湾



4 573336 280041

# CANE

## DR. CANE ドクターケイン

- 杖先が 360° 自由に回転して体を支えます。
- 内蔵したスプリングにより伸縮し、杖が地面についた時の衝撃をやわらげます。
- 10段階に長さの調節ができます。
- 本体にカーボンを使用していますので、軽く丈夫です。(アルミの20倍の耐荷重度 / メーカー調べ)



実用新案：杖先が 360° 回転  
サイズ 71～93.5cm

# 他にはない特徴

## 天然木製握りグリップ

人間工学に基づいたグリップ、  
握りやすいため、握りやすいためです。



## スプリング構造

杖を握り合せた際に衝撃を吸収し、  
手首、肘の衝撃を軽減します。



## 先ゴム

這口に開発した杖先（径40mm）  
簡単に交換出来る、滑りやすいです。



## 調節穴

## 調節ボタン

2.5cm間隔で  
10段階調整できます。

## 球体関節パーツ

360度回転デザイン、  
様々な角度も対応できます。

**CANE**  
DR. CANE


# 取扱説明書

## 長さの目安

杖先を足先の前方外側約  
20cmの所に置き、肘が  
30~40度曲がる状態が杖  
の長さの目安です。

## 長さの調整方法

調整ボタンを押しながら  
調整の所に置き、肘が  
適度な長さにし、調整穴  
に確実にボタンを入れて  
ください。

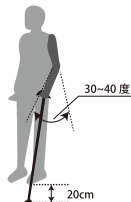

## ⚠️ご使用上の注意

- この杖は自立歩行できる方の安定的歩行を補助するものです。
- 杖先ゴムが摩耗したり、劣化し外れやすくなった場合は早めに交換してください。
- この杖は一般の路面で使用し、山道などでは使用しないでください。
- 濡れたり、凍ったりした路面では滑りやすいので、十分にご注意ください。
- 各部の破損、ぐらつき等の機能異常などがあれば、使用せずに販売店に相談してください。
- 使用後は水分、汚れ等を拭きとり、室内の乾燥した場所に保管し、ストーブの前、夏場の自動車の車内などの高温の場所には保管しないでください。
- 道路の側溝の溝や、凹みがある所では、杖先がはまり込むことがありますので、十分注意してください。
- 身体に合った杖を選んでください。（「ご使用の前に」参照）
- 使用前に各部の点検をしてください。
- 使用中も含め、支柱の継ぎ目や長さ調節部が確実に固定されているかご確認ください。
- この製品は歩行を補助する為のもので、他の用途（例えば登山・護身など）には使用しないでください。